

Návod k použití (CS) SoftCup™ Speciální láhev ke krmení

Účel použití

Speciální láhev SoftCup je určena ke krmení kojenců mateřským mlékem a tekutou stravou o konzistenci podobné mateřskému mléku.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím si pečlivě prostudujte návod.

- I Tento produkt používejte pouze k výše uvedenému účelu a v souladu s návodem k použití.
- I Použití více než jedním kojencem bez náležité opětovné údržby/čištění může představovat zdravotní riziko a mohlo by způsobit křížovou kontaminaci.
- I Používejte pouze originální příslušenství Medela.
- I Před každým použitím zkontrolujte. Při prvních známkách poškození, výskytu plísňe nebo opotřebením produkt vyhoďte.
- I Nikdy nenechávejte obal a komponenty bez dozoru. Uchovávejte mimo dosah dětí.

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE

Důležité bezpečnostní pokyny

- I Plastové láhve a jednotlivé díly mohou být po zmrazení křehké a mohou se při pádu z výšky rozbít.
- I Láhve a jednotlivé díly se také mohou poškodit při nesprávném zacházení, například při nárazu, po příliš silném utážení nebo převrhnutí.
- I S láhvemi i s jednotlivými díly manipulujte opatrně.
- I Mléko ani jinou tekutou stravu nepoužívejte, jsou-li láhve nebo jednotlivé díly poškozené.

Čištění

Důležité

- I K čištění používejte výhradně pitnou vodu.
- I Před prvním použitím všechny díly vyčistěte (viz níže).
- I Po použití všechny díly okamžitě vyčistěte.
- I Při čištění pohárku neobracejte zásobník naruby.
- I Nečistěte zásobník ostrými ani tvrdými předměty (např. kartáčkem, párátkem ani ostrými nehty).
- I Níže uvedené pokyny k čištění mají všeobecnou povahu. Informace o místních předpisech a směrnicích získáte od regionálního zástupce společnosti Medela nebo na naší webové stránce (www.medela.com).

Po každém použití

- I Rozložte láhev SoftCup na jednotlivé díly. Za všech okolností oddělte základnu žlutého ventilu od zásobníku. Od základny ventilu oddělte také bílou membránu.

Poznámka: Mléko zbývající v láhvi můžete znovu použít.

Mléko zbývající v zásobníku je však nutně vyhodit. Za tímto účelem podržte SoftCup nad dřezem, opatrně odšroubujte uzávěr a vyjměte jej spolu se zásobníkem a základnou ventilu tak, aby nedošlo k rozlití mléka. Mléko zbývající v zásobníku zlikvidujte.

- I Opláchněte všechny díly studenou vodou (přibližně 20 °C). Důkladně opláchněte postranní polštářky (štěrbinu v postranním polštářku) zásobníku a odstraňte maximální možné množství zbytků mléka.
- I Důkladně vyčistěte všechny díly dostatečným množstvím teplé mýdlové vody (přibližně 30 °C). Použijte běžně dostupné mycí prostředky, nejlépe bez umělých vůní a barviv (určené k použití v nemocnicích: 5–15 % anionické tenzidy, neionické tenzidy, pH neutrální).
- I Opláchněte všechny díly studenou vodou (přibližně 20 °C).
- I Osušte čistou utěrkou nebo nechte vyschnout na čisté utěrcce.
- I Produkt lze umývat také v myčkách nádobí. Umístěte díly do horního koše nebo do příhrádky na příbory. Použijte běžně dostupný prostředek k použití v myčkách nádobí.

Domácí použití:

Před prvním použitím a potom jednou denně

- I Vyčistěte SoftCup dle popisu uvedeného v oddílu „Po každém použití“.
- I Vydezinfikujte SoftCup dle popisu uvedeného v oddílu „Dezinfekce“.

Použití v nemocnici:

Před prvním použitím – jednou denně – před použitím dalším kojencem

- I Vyčistěte a vydezinfikujte SoftCup dle popisu uvedeného v oddílu „Dezinfekce“.
- I Vyžadují-li to národní, regionální nebo nemocniční předpisy, proveďte sterilizaci SoftCup dle pokynů uvedených v oddílu „Sterilizace“.

Dezinfekce

Domácí použití:

- I Ponořte všechny díly do vody a nechte je 5 minut vařit.
- I Případně použijte sáček Quick Clean a proveďte čištění v mikrovlnné troubě dle pokynů.
- I Osušte čistou utěrkou nebo nechte vyschnout na čisté utěrcce.

Použití v nemocnici:

- I Vyčistěte a vydezinfikujte všechny díly v mechanické dezinfekční myčce. Použijte odpovídající vložky na dezinfekci drobných dílů. Použijte běžný čisticí prostředek pro dezinfekční myčky (bez NTA, fosfátů, chlóru a tenzidů, alkalický s pH 11,7–12,7).
- I Dezinfekci provádějte po dobu 5 minut při teplotě 93 °C.
- I Dle výše uvedených pokynů vyberte program, který zahrnuje sušení. Nezahrnuje-li příslušný program sušení, osušte vyčištěné díly čistou utěrkou nebo je nechte vyschnout na čisté utěrcce.

Sterilizace

Použití v nemocnici:

- I Zkontrolujte, zda jsou díly produktu čisté, suché a neporušené.
- I Zabalte díly produktu do vhodného sterilního obalu.
- I Sterilizujte produkt v autoklávu při teplotě 134 °C po dobu 5 minut. Abyste předešli poškození, produkt nestohujte ani nevystavujte vnějšímu tlaku.

Skladování

Umístěte čisté díly do čistého skladovacího sáčku nebo do čistého prostředí. Je důležité, aby veškerá zbytková vlhkost vyschla. Neskladujte díly ve vzduchotěsné nádobě nebo sáčku.

Postup použití

- I SoftCup lze použít jako alternativu ke krmení pohárkem.
- I Doporučuje se, aby matka prováděla své první krmení pomocí láhve SoftCup pod dohledem profesionála / školeného personálu.
- I Než se dotknete produktu (dílu), důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem. Osušte si ruce čistou utěrkou nebo jednorázovou papírovou utěrkou.
- I Před krmením dítěte vždy zkontrolujte teplotu mléka / tekuté stravy.


Sestavení láhve SoftCup

- Šroubovací uzávěr
- Špička pohárku
- Postranní polštářky
- Silikonový zásobník
- Membrána
- Základna ventilu (s vysokým lemem v horní části)
- Láhev na mléko



- I Uchopte základnu ventilu tak, aby vysoký lem směřoval vzhůru. Na lem základny ventilu umístěte bílou membránu. Zatačte výstupek membrány na doraz do středového otvoru základny ventilu.
- I Naplňte láhev požadovaným množstvím tekuté stravy.
- I Umístěte sestavený ventil s vysokým lemem směřujícím vzhůru na otvor láhve.
- I Na základnu ventilu umístěte zásobník tak, aby se lem nacházel uvnitř zásobníku.
- I Nasuňte šroubovací uzávěr na zásobník. Všechny díly pevně přišroubujte k uzávěru.

Plnění savičky

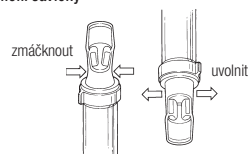

- I Držte SoftCup ve svislé poloze. Stiskněte jej těsně pod postranními polštářky tak, abyste ze zásobníku vytlačili určité množství vzduchu (viz obrázek výše).
- I Pokračujte v mačkání a otáčejte SoftCup dnem vzhůru.
- I Nyní uvolněte postranní polštářky. Do zásobníku nateče určité množství tekutiny.
- I Výše uvedené kroky opakujte, dokud nebude zásobník téměř plný.
- Poznámka:** Pokud se zásobník neplní, ujistěte se, že je štěrbin v postranní polštářku otevřená. Silným tlakem prstu zajistěte průtok tekutiny.

Krmení

- I Držte SoftCup ve vodorovné poloze pod mírným úhlem směrem vzhůru (viz obrázek vpravo). Jakmile takto uchopíte láhev, bude zásobník možné automaticky doplňovat již během krmení. Stačí jej jen stisknout pod postranními polštářky.
- I Lehce stiskněte oba polštářky po stranách zásobníku, čímž vytlačíte tekutinu do špičky pohárku.
- I Špičku se dotkněte rtů kojence, aby otevřel ústa.
- I Přiložte zásobník ke spodnímu rtu kojence (se špičkou pohárku směřující vzhůru). Opatrně poklepejte na pohárek, aby tekutina v zásobníku stékala do úst kojence. Kojenec začne obvykle tekutinu sám pít.
- Poznámka:** Pokud SoftCup protéká, ujistěte se, že je správně sestaven.

