

MEDELA Misky k zachycení mléka

Návod k použití MEDELA Misky k zachycení mléka

Návod na použití MEDELA Misky na zachycenie mlieka

Misky k zachycení mléka sbírají unikající mléko a jsou pohodlné při nošení. Anatomický tvar a pružný materiál, který je šetrný k pokožce, znamenají, že jsou misky příjemné a diskrétní.

Indikace:

- Během kojení, kdy mléko začne téct i z druhého prsu
- Při velkém úniku mléka

Nepoužívejte v průběhu noci, abyste předešli otlačeninám.

Sestavení a použití:

Přitlačte silikonovou membránu na misku. Ujistěte se, zda sedí po celém obvodu misky. Připravenou misku vložte do podprsenky, tak aby bradavka byla uprostřed otvoru silikonové membrány. Doporučujeme nosit mateřskou podprsenku; mateřské podprsenky jsou větší a prostornější, tím pádem miska nevytváří tak silný tlak na prs, jako při nošení běžné podprsenky. Ujistěte se, že větrací otvor je otočen směrem nahoru. Při vyjímání misek se mírně nakloňte. Zachycené mléko může být nalito do jiné nádoby či lahve.

Upozornění: Do sterilní lahve může být uskladněno pouze mléko, které bylo zachyceno v miskách v průběhu kojení. Pokud mléko není rovnou podáno dítěti, ihned umístěte lahev do ledničky a spotřebujte do 24 hodin. Aby vlhkost nepoškodila bradavky, doporučujeme odjímat misky každé 2-3 hodiny a nechat prsy volně uschnout.

Čištění:

Před prvním použitím a následně 1x denně

Rozložené části misek vložte do malého hrnce se studenou vodou. Doporučujeme použití destilované vody – v případě použití vody z vodovodu přidejte do hrnce trochu kyseliny citrónové, čímž zabráníte vzniku vodního kamene. Přiveďte vodu k varu a nechte vařit přibližně 5 minut. Poté části vyjměte a řádně je omyjte. Nechte usušit na suché a čisté utěrce.

Po každém použití:

Rozložte všechny části misek. Misky a membrány umyjte jemným čisticím prostředkem, řádně opláchněte studenou vodou a poté nechte usušit na suché a čisté utěrce.

Poznámka:

Misky a membrány mohou být čištené v myčce anebo v autoklávu.

Materiál:

Misky: Polypropylen
Silikonové membrány: Silikon

Likvidace:

Dle místních předpisů.

Pro ošetření plochých nebo vpáčených bradavek doporučujeme Medela Formovače bradavek.

Suché a popraskané bradavky mohou být chráněny před dalším podrážděním použitím Medela Chráníčův bradavek.

MEDELA Misky na zachycenie mlieka

Misky na zachycenie mlieka zbierajú unikajúce mlieko a sú pohodlné pri nosení. Anatomický tvar a pružný materiál, ktorý je šetrný k pokožke, znamenajú, že sú misky príjemné a diskrétné.

Indikácie:

- Počas dojčenia, keď mlieko začne tečť aj z druhého prsníka
- Pri veľkom úniku mlieka

Nepoužívajte v priebehu noci, aby ste predišli otlačeninám.

Zostavenie a použitie:

Pritlačte silikonovú membránu na misku. Uistite sa, či sedí po celom obvode misky. Pripravenú misku vložte do podprsenky, tak aby bradavka bola uprostred otvoru silikonovej membrány. Odporúčame nosiť materskú podprsenku; materské podprsenky sú väčšie a priestrannejšie, tým pádom miska nevytvára taký silný tlak na prsník, ako pri nosení bežnej podprsenky. Uistite sa, že vetrací otvor je otočený smerom nahor. Pri vyberaní misiek sa mierne nakloňte. Zachytené mlieko môže byť preliate do inej nádoby či fľaše.

Upozornenie: Do sterilnej fľaše môže byť uskladnené iba mlieko, ktoré bolo zachytené v miskách počas dojčenia. Ak mlieko nie je hneď podané dieťaťu, ihneď umiestnite fľašu do chladničky a spotrebujte do 24 hodín. Aby vlhkosť nepoškodila bradavky, odporúčame odnímať misky každé 2-3 hodiny a nechať prsníky voľne uschnúť.

Čistenie:

Pred prvým použitím a následne 1x denne

Rozložené časti misiek vložte do malého hrnce so studenou vodou. Odporúčame použiť destilovanú vodu - v prípade použitia vody z vodovodu pridajte do hrnce trochu kyseliny citrónovej, čím zabránite vzniku vodného kamene. Privedte vodu do varu a nechajte variť približne 5 minút. Potom časti vyberte a poriadne ich opláchnite. Nechajte usušiť na suchej a čistej utierke.

Po každom použití:

Rozložte všetky časti misiek. Misky a membrány umyte jemným čisticím prostriedkom, poriadne opláchnite studenou vodou a potom nechajte usušiť na suchej a čistej utierke.

Poznámka:

Misky a membrány môžu byť čištené v umývačke riadu alebo v autokláve.

Materiál:

Misky: Polypropylén
Silikonové membrány: Silikón

Likvidácia:

Podľa miestnych predpisov.

Pre ošetrenie plochých alebo vpadnutých bradaviek odporúčame Medela Formovače bradaviek.

Suché a popraskané bradavky môžu byť chránené pred ďalším podráždením použitím Medela Chráničov bradaviek.

