



Alternativní pomůcky ke krmení dětí

Více bezpečí v prvních hodinách života, podpora laktace a kojení

I když se narodí novorozenec zdravý a donošený, proces fungování reflexních dějů u dítěte i matky vyžaduje čas a trpělivost jak matky, novorozence tak i personálu. Narodí-li se dítě s problémem, dojde-li navíc k jeho byt jen krátkodobé separaci od matky, zásadně se tak změní podmínky pro rozvoj vazby matka a dítě, pro iniciaci fyziologických dějů v souvislosti s laktací. Novorozenec nemá optimální podmínky v dutině ústní a v obličejí pro přísátí. Efekt sání je přitom velmi důležitý pro tvorbu mateřského mléka. Laktace je vážně ohrožena! Včasné použití dvoufázové odsávačky mateřského mléka je cestou k záchraně laktace a k možnému dlouhodobému kojení.

Přínos kombinace 2-fázového odsávání s odsáváním z obou prsů současně

- Podobný pocit jako při sání dítěte z prsu (1. fáze stimulační, 2. fáze odsávací).
- Rychlejší, efektivnější a šetrnější k prsní tkáni.
- Stimuluje mléčnou žlázu k vyšší produkci mléka.
- Během 15ti minut odsávání navýší objem odsátého mléka o 18 %.
- Více odsátého zadního mléka s vyšším obsahem tuku a i proto je prs lépe vyprazdňován.
- Mléko má vyšší energetickou hodnotu.



Nemocniční odsávačka - možnost zapůjčení

Vhodnost použití:

- ✓ krátkodobé i dlouhodobé odsávání
- ✓ pozdní nástup laktace (porod císařským řezem, protahovaný porod, předčasně narozené dítě)
- ✓ nedostatek ná nebo snížená tvorba mléka
- ✓ separace dítěte od matky
- ✓ dlouhodobé udržení laktace



Osobní elektrické odsávačky

Pro dlouhodobé odsávání jsou nejvhodnější variantou elektrické 2-fázové odsávačky Flex™ na dvě prsa.



Swing Maxi™ NEW

Freestyle Flex™

Alternativní pomůcky

Přirozené kojení není bohužel možné ve všech případech. Děti, které nemohou být kojeny, potřebují materské mléko a podporu, aby byly schopny získat potřebné množství důležitých nutričních hodnot. Medela nabízí pomoc ve formě alternativního způsobu podávání materského mléka.



Suppletor

- ✓ nahrazuje a doplňuje kojení
- ✓ poskytuje přímý kontakt mezi matkou a dítětem
- ✓ podporuje rozvoj orofaciálního systému dítěte
- ✓ podporuje zvýšení laktace
- ✓ vhodný pro spavé děti, děti s nízkou porodní hmotností, adoptované děti
- ✓ zajišťuje příkrmování mlékem bez použití lahví a dudlíků



Finger

- ✓ jemný silikonový nástavec na injekční stříkačku



Babycup

- ✓ ideální pro podávání materského mléka, formule, případně léků
- ✓ objem 30 ml



Softcup

- ✓ měkká, silikonová savička ve tvaru lžičky
- ✓ možnost regulace průtoku mléka
- ✓ savičku lze prsty přizpůsobit velikosti úst dítěte

Podávání materského mléka



Kontaktní kloboučky

- ✓ usnadní přísátí dítěte s orofaciálními problémy k většímu a pevnějšímu bodu



Dudlík k láhvi jednorázový

- ✓ vhodné pro použití v nemocnici
- ✓ pouze pro jedno použití
- ✓ jednorázové produkty optimalizují nemocniční procesy
- ✓ podpora hygienické péče



Calma

- ✓ podpora rozvoje orálního krmení
- ✓ až dítě vytvoří vakuum, dojde k zahájení toku mléka díky speciální membráně, což umožňuje přechod z prsu na Calmu a zpět k prsu



SpecialNeeds

Láhev SpecialNeeds umožňuje variabilní a kontrolovatelný průtok mléka, který vyhovuje schopnostem a úsilí dítěte. Poloha savičky/rysky v ústech dítěte ovlivňuje otevření dírký v horní části savičky. Průtok lze upravit nasměrováním příslušné rýsky na savičce na nos dítěte. Speciální ventil zabraňuje zahlcení dítěte při krmení a polykání přebytečného vzduchu. Poskytuje pomoc, když děti nemohou vytvořit vakuum.

Láhev SpecialNeeds je určena ke krmení kojenců s:

- ✓ vadami dutiny ústní a obličeje, jako je rozštěp rtu/patra,
- ✓ neurologickými, srdečními nebo respiračními poruchami, které jsou příčinou obtížné koordinace při sání, polykání a dýchání,
- ✓ vadami jako je nízký svalový tonus,
- ✓ Pierre Robinovým nebo Downovým syndromem.

Medela také nabízí **Dudlík SpecialNeeds Mini** který je určen pro menší nebo předčasně narozené děti.

Výhradní distributor:

DN FORMED Brno s.r.o.

Hudcova 76a

612 00 Brno

+420 532 198 888

www.dnformed.cz

dnformed@dnformed.cz

medela@medela.cz



© vydal DN FORMED Brno s.r.o., 2023/M03_0081

www.medela.cz